

「シルコム プラス」ソフトウェア アップデート手順

アップデートには SD カードが必要です。あらかじめ SD カードをご用意ください。

※ 本アップデートを実行しても焼成プログラムは変更されません。

◇手順

- ① 弊社 HP よりダウンロードした ZIP ファイルを解凍後、お手持ちの SD カードのルートフォルダに以下のデータをコピーしてください。
 - ・ZRP_Vxx.mot (プログラムファイル xx はプログラムバージョン番号)
 - ・ZRP0_Jyy (画像データフォルダ yy は画像バージョン番号)
- ② 上記①の SD カードを本体の SD カードスロットに挿入し電源を ON してください。
- ③ 本体の画面表示に従いアップデートを実行します。

(1) START/STOP ボタンを押してください。アップデートを開始します。

ZRP_Vxx.MOT : 20YY/MM/DD hh:mm:ss

[Program] updating ?

Yes : [START/STOP] KEY

No : [OTHER] KEY

(2) 数秒でアップデートが完了します。再度 START/STOP ボタンを押してください。

Update OK

Please [START/STOP] key

(3) 続いて画像データのアップデートを実行します。START/STOP ボタンを押してください。
アップデートには数分かかります。最終行に「Update OK」と表示されれば完了です。


Display Data updating ?

from "ZRP0_Jyy"

Yes : [START/STOP] KEY

No : [OTHER] KEY

START/STOP ボタン
(数分かかります)

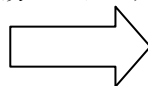

fileaddr : 5012h

addr 3F5432h, next_addr:3FA7C0h

check sum : DADCh

Update OK

以上でアップデート作業は完了です。SD カードを抜いてください。

何れかのボタンを押すとスタンバイモードに移ります。