

歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用キャストニングワックス JMDN16189000

## CADワックスプロ

---

### 【形状・構造及び原理等】

ディスク状でサイズは下記の種類がある。

- φ98×14 mm
- \* φ98×18 mm
- φ98×20 mm
- φ98×22 mm

成分: ポリエチレン、色素

### 【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製のキャストニングワックスである。

### 【使用方法等】

- ①CAD/CAM装置で本品を切削加工する。
- ②通法に従い、埋没し、鋳造、研磨を行う。

### 【使用上の注意】

[使用注意]

- ・本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ・本品は、使用目的に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

- \*\*住所: 〒601-8356  
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
- \*\*電話番号: 075-672-2118

外国製造業者: DMAX Co.,Ltd

国名: 大韓民国