

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科用ステンレス鋼線 JMDN70792000

ステンレスバー

【禁忌・禁止】

ニッケル又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 形状: 棒状の金属バー
(上顎用パラタルバー、下顎用リンガルバー)
- 成分: 下表のとおり

成分	分量 %
ニッケル	10~14
クロム	16~18
鉄	62~72
その他 (モリブデン、マンガ ン、ケイ素)	2~6

- 性能等

引張強さ (MPa)	原品: 1100±100 軟化: 640±50
伸び (%)	原品: 3~6 軟化: 50±10

- 原理: 口蓋粘膜面上を走行する金属バーで、義歯床や維持装置と連結させることにより義歯床の面積を小さくする。

【使用目的又は効果】

歯科補綴物又は矯正用等の装置を作製する。

【使用方法等】

- 義歯床の補強する部分に合わせ長さを決定し、本品を切断する。
- 義歯床の粘膜面に合わせ本品を屈曲する。
- 軟化熱処理する場合は、1000℃~1150℃の炉内で加熱した後、放冷する。

【使用上の注意】

- 使用注意

- 本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- 本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- 本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

- 重要な基本的注意

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

- 不具合・有害事象

有害事象
掌跖膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります

【包装】

上顎用パラタルバー

サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	質量 (g)	長さ (cm)	包装
大	3.7	1.25	25	31	3本
小	3.0	1.4	24		

下顎用リンガルバー

サイズ	幅 (mm)	高さ (mm)	質量 (g)	長さ (cm)	包装
大	2.7	1.4	20	31	3本
小	2.5	1.5	20		

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

住所: 〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石郡町 130

電話番号: 075-574-1000

FAX番号: 075-571-5000

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社