

リライニングサンド

〈リライニングサンドの特徴〉

- 「バイオ：トーン」とリライニング材及び即時重合レジンとの接着強化用表面処理剤です。
- 義歯処理面に「リライニングサンド」でブラスト処理する事で、リライニング及び即時重合レジンの接着力を強化します。

使用 方 法

- 通法に従い、サンドブラスターで義歯処理面に「リライニングサンド」をブラスト処理して下さい。
- 詳細は、当社の「リライニング・プレ・プライマー」の取扱説明書を参照して下さい。

ご 注 意

- ご使用の際は、必ず防塵メガネ・防塵マスク・手袋を付けて、バキューム装置を付けて下さい。
- 本剤のご使用は、「サンドブラスター」のメーカーの指定する方法に従って下さい。
- 循環式は避けてペンシルブラスター等使い捨て式サンドブラスターをご使用下さい。
(※接着効力が低下します。)

〈関連器材〉



ミニブラスター

用途：簡易サンドブラスター（ハンディタイプ）

- リライニング材被着面の表面処理に便利です。
(※「リライニングサンド」使用)
- その他歯科用表面処理剤にも使用可能です。
- 集塵ボックス「きんざん」と併用すれば飛散がなく便利です。

一般医療機器 歯科用研削器材
26B2X10018M00091

包装：1 set（本体・ホース付）

13,500円



ペンシル・ブラスター

用途：小型サンドブラスター（ペンシルタイプ）

- エアーレギュレーター及びフットスイッチ付ペンシルブラスターです。
- 便利で耐久性のあるペンシルタイプ採用のため幅広くご使用いただけます。
- 集塵ボックス「きんざん」と併用すれば飛散がなく便利です。

外寸：W180mm×D180mm×H235mm
重量：1.8 kg

包装：1 set（本体・フットスイッチ付）

120,000円