

弊社のホームページ
技工用材料 > アクリジェット より
必要部数を印刷してください。
尚、従来添付しておりました「A マーク」は、
2016 年 12 月 1 日より廃止致しました。



MSY696

アクリ:ジェット
2021 年 4 月 20 日

歯科医院様にお届けください。

(技工所様も必ずお読みになってください。)

下記事項は「アクリ:ジェット」改良品で作った義歯のトラブル回避の為の注意事項です。
義歯と一緒に歯科医院様にお届けください。

義歯材料の記録のお願い。

現在、熱可塑性の樹脂は弊社をはじめ他社メーカー様より様々な材質、商品名で販売されております。

材質によって、修理やリライニングの方法、使用する材料が異なります。

歯科医院様におきましては後日の修理及びリライニングを円滑に行なうため、使用材料名をカルテ等に記録することをお勧めします。

使用材料名

「アクリ:ジェット」改良品

注意事項 ※クラックの原因になる恐れがありますので下記の行為は避けてください。

- (1) 70℃以上の温水浸漬は避けてください。(※日常生活の飲食には差し支えありません。)
- (2) スチーム洗浄器による洗浄は避けてください。(但しノズルより 4cm 以上離せば使用できます。)
- (3) 自動研磨機の使用は避けてください。(内部温度が 70℃以上になる為)
- (4) 熱処理 (アニーリング) は避けてください。
- (5) オートクレーブ (121℃/135℃) には入れないでください。
- (6) 脱ロウ工程を伴う間接裏装法は避けてください。※脱ロウ工程および加熱重合工程が 70℃以上になる為
- (7) 咬合調整後カーボン紙の洗浄を含む消毒用アルコールの使用は避けてください。
白化する場合があります。(但し 60%以上)

義歯の修理について

・即時重合レジンによる修理はもちろん、床交換法、直接法による裏装法(リライニング法)による修理が可能です。

※ 但し、上記注意事項を守ってください。

使用可能な薬品および洗剤

全ての薬品及び洗浄剤が使用できます。

✂ キリトリ線 ✂

患者様にお渡し下さい。

アクリ:ジェット

使用可能な入れ歯洗浄剤

- ・さわやかデント (デンケン・ハイデンタル株)
定価 3,780 円 (税込) / 約 300 回使用分
- ・その他市販の「入れ歯洗浄剤」

[御注意] : ①70℃以上の熱いお湯に漬けないで下さい。※日常生活の飲食には差し支えありません。

: ②消毒用アルコール(60%以上)の使用は避けてください。

取説 別添

HK.02.063D