

歯科材料 06 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科複模型用ゴム質弾性印象材料 JMDN70891000

ハイシリコーン II

【形状・構造及び原理等】

構成名	形状	成分
主剤	液状	オルガノポリシロキサン、他
硬化剤	液状	オルガノポリシロキサン、他

性能等

硬化時間：約25分

硬さ：17±2（ショアー硬さ）

【使用目的又は効果】

シリコーンゴムを主成分とする印象材で、複模型の作製に用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

1) 使用注意

- ①本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ②長期間保存又は使用しなかった本材を使用するときは、容器をゆっくり回転させ、均一にしてから使用すること。
- ③本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

2) 重要な基本的注意

- ①シリコーン印象材に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある術者は使用しないこと。
- ②本材の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は、使用を中止し、医師の診察を受けること。
- ③本材または練和物は目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐ大量の流水で洗浄し、眼科医の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本材は、直射日光、火気を避け、常温（15～25℃）で保管すること。
- ・開封後は、密閉して保管すること。
- ・本材は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は当社データによる。〕

【包装】

①2 kg：主剤1 kg＋硬化剤1 kg

②10 kg：主剤5 kg＋硬化剤5 kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

外国製造所：メガデンタル (megadental GmbH)

国名：ドイツ