

歯科材料03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン JMDN70825000

アクリ:ジェット

【禁忌・禁止】

メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：ペレット状

成分：ポリメタクリル酸メチル、色素

- * 色調：#0 クリアー、#1 クリアーピンク、#2 ライトピンク
#3 ピンク、#7 ライブピンク、#7 α リアルピンク
#8 ライブライトピンク

性能等：

| 項目 | 仕様 | |
|-----------------------------------|------|-----|
| 曲げ強さ(MPa) | 35 | |
| 曲げ弾性率 (MPa) | 1320 | |
| レジン歯との結合力 (N) | 上顎用 | 105 |
| | 下顎用 | 50 |
| 吸水量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$) | 22 | |
| 溶解量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$) | 0.3 | |

原理：本品を加熱溶解し、型に射出成型することにより所定の形状に成型する。

【使用目的又は効果】

義歯床、仮床、バイトプレート、個人トレー、ナイトガード、スプリント等を作製するために用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

【使用注意】

- 本品を溶解する際には、密閉した部屋での作業を避け、適切な排気装置を使用して、加熱により発生するガスを吸引しないこと。
- 本品の硬化物を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- 本品の溶解中に発泡する場合は、本品の乾燥不足又は過熱溶解が考えられるため、下記の事項を確認すること。
 - 乾燥温度が低い：85℃であることを確認すること。
 - 乾燥時間が短い：4時間以上であることを確認すること。
 - 溶解温度が高い：取扱説明書の溶解温度を確認すること。
 - 溶解時間が長い：取扱説明書の溶解時間を確認すること。以上の内容を確認しても改善しない場合は、装置の不具合も考えられるため、製造販売業者に連絡すること。

【重要な基本的注意】

- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

【保管方法】

- 本品は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて保管すること。
- 本品は使用後、必ず蓋を閉めて保管すること。
- 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【有効期間】

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。
〔記載の使用期限は当社データによる。〕

【包装】

40 g×12

1 kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電 話 番 号：075-672-2118

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社