

歯科材料03 義歯床材料  
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン JMDN70825000

## バイオ:トーン

### 【形状・構造及び原理等】

形状：ペレット状  
成分：ポリアミド、色素  
\* 色調：#0 クリアー  
#7 リアルピンク  
#OR オリジナル

性能等：

項目	仕様	
曲げ強さ (MPa)	57±10	
曲げ弾性率 (MPa)	1340±50	
レジン歯との結合力 (N)	上顎用	90±20
	下顎用	40±20
吸水量 (µg/mm <sup>3</sup> )	33±5	
溶解量 (µg/mm <sup>3</sup> )	0.5以下	

原理：本品を加熱溶解し、型に射出成型することにより所定の形状に成型する。

### 【使用目的又は効果】

義歯床、仮床、バイトプレート、個人トレー、ナイトガード、スプリント等を作製するために用いる。

### 【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品の硬化物を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて保管すること。
- ・本品は使用后、必ず蓋を閉めて保管すること。
- ・本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。  
〔記載の使用期限は当社データによる。〕

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\* 電 話 番 号：075-672-2118

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください