

バイオ:トーン

【形状・構造及び原理等】

形状: ペレット状

成分: ポリアミド、色素

**色調: #0 クリアー

#7αリアルピンク

#OR オリジナル

性能等:

項目	仕様
曲げ強さ (MPa)	57±10
曲げ弾性率 (MPa)	1340±50
レジン歯との結合力 (N)	上顎用 90±20
	下顎用 40±20
吸水量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$)	33±5
溶解量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^2$)	0.5以下

原理: 本品を加熱溶解し、型に射出成型することにより所定の形状に成型する。

【使用目的又は効果】

義歯床、仮床、バイトプレート、個人トレー、ナイトガード、スプリント等を作製するために用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本品の硬化物を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- 本品は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて保管すること。
- 本品は使用後、必ず蓋を閉めて保管すること。
- 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。

〔記載の使用期限は当社データによる。〕

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

住所: 〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石郡町130

電話番号: 075-574-1000

FAX番号: 075-571-5000

*製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください