

歯科材料03 義歯床材料
管理医療機器 義歯床用熱可塑性レジン JMDN70825000

アクリトーン

【禁忌・禁止】

メタクリレート系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状: ペレット状

成分: ポリメタクリル酸メチル、色素

色調: #0 クリアー、#1 クリアーピンク、#2 ライトピンク

#3 ピンク、#7 ライブピンク、#7αリアルピンク

性能等:

項目	仕様	
曲げ強さ (MPa)	48	
曲げ弾性率 (MPa)	1360	
レジン歯との結合力 (N)	上顎用	105
	下顎用	50
吸水量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$)	22	
溶解量 ($\mu\text{g}/\text{mm}^3$)	0.3	

原理: 本品を加熱溶解し、型に射出成型することにより所定の形状に成型する。

【使用目的又は効果】

義歯床、仮床、ナイトプレート、個人トレー、ナイトガード、スプリント等を作製するために用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

【使用上の注意】

(使用注意)

- ① 本品を溶解する際には、密閉した部屋での作業を避け、適切な排気装置を使用して、加熱により発生するガスを吸引しないこと。
- ② 本品の硬化物を研削、研磨する際には、局所集塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ③ 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ④ 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。
- ⑤ 本品の溶解中に発泡する場合は、本品の乾燥不足又は過熱溶解が考えられるため、下記の事項を確認すること。
 - i) 乾燥温度が低い: 85°Cであることを確認すること。
 - ii) 乾燥時間が短い: 4時間以上であることを確認すること。
 - iii) 溶解温度が高い: 取扱説明書の溶解温度を確認すること。
 - iv) 溶解時間が長い: 取扱説明書の溶解時間を確認すること。以上の内容を確認しても改善しない場合は、装置の不具合も考えられるため、製造販売業者に連絡すること。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・ 本品は、火気、高温、多湿又は直射日光を避けて保管すること。
- ・ 本品は使用後、必ず蓋を閉めて保管すること。
- ・ 本品は歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

(有効期間)

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。

(記載の使用期限は当社データによる。)

* 【包装】

30 g × 12

300g

1kg

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

住所: 〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石群町130

電話番号: 075-574-1000

FAX番号: 075-571-5000

* * 製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください