

歯科材料 03 義歯床材料  
管理医療機器 義歯床用接着材料 JMDN 70834000

## スーパープライマー

### 【警告】

本品は口腔内直接法用ではありません。口腔内で直接使用しないこと。

### 【禁忌・禁止】

本品には有機溶剤が含まれているので蒸気を吸引しないこと。

### 【形状・構造及び原理等】

形状: 液体

成分: ヘキサフルオロイソプロパノール、その他

性能等: 引張接着強さ: 5MPa以上

原理: 本品をポリアミド床義歯の被接着面に塗布することにより表面を改質し、接着効果を促進させる。

### 【使用目的又は効果】

義歯床の作製、補修及び裏装においてポリアミド義歯床と再射出成形されたポリアミド樹脂を接着させることに用いる。

### 【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品を使用する際には、局所排気装置を用いて十分換気を行うこと。
- ②本品を使用する際には、必ず医療用(歯科用)手袋及び保護メガネ、保護マスク(品名: 塗装マスク、品番: DPM-77TM、販売元: トラスコ中山(株))などを着用すること。眼、皮膚又は衣服に付着しないよう充分注意すること。
- ③本品が皮膚に付着した場合は、多量の水及び石鹸で洗い流す。症状が出た場合には、必要に応じて医師の診断を受けさせること。
- ④本品が万一眼に入った場合は、直ちに大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。
- ⑤本品を吸入した場合は、新鮮な空気のある場所に移動させ安静にし、医師の手当てを受けさせること。
- ⑥容器を転倒させ落下させ衝撃を与える等の粗暴な扱いはしないこと。

ないこと。

- ⑦本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
- ⑧本品は記載の用途以外には使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ①本品は口腔内直接法用ではありません。口腔内で直接使用しないこと。
- ②本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には又は術者においては、ただちに使用を中止し、医師の診断を受けさせるか、又は受けること。
- ③多量の蒸気を吸入した場合、せき、呼吸困難、頭痛、めまいなどを生じるおそれがある。眼に接触した場合、失明するおそれがある。皮膚に付着した場合、薬傷を生じるおそれがある。

### 【保管方法及び有効期間等】

- ・本品は、高温、多湿又は直射日光を避けて「0～23℃」で保管すること。
- ・本品は揮発性が高いため、必ず密閉して保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装、容器に記載の使用期限までに使用すること。  
〔記載の使用期限は当社データによる。〕

### 【包装】

30mL

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社  
住 所: 〒607-8187  
京都府京都市山科区大宅石郡町 130  
電 話 番 号: 075-574-1000  
F A X 番 号: 075-571-5000

\* 製 造 元: デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください