

歯科材料(03) 義歯床材料
一般医療機器 歯科印象トレー用レジン JMDN70832000

NextDent オルソ IBT

【禁忌・禁止】

メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

*住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

*電話番号：075-672-2118

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：液体
- 2) 成分：脂肪族二官能性ウレタンアクリレート、
ビスフェノールAエトキシレートジメタクリレート、他
- 3) 原理：本品は、3Dプリンターを用いて造形し、光重合により硬化します。

外国製造業者：Vertex Dental B.V.

製造国：オランダ

【使用目的又は効果】

本品は、粉末及び液体の常温重合レジン、ペースト状で常温で硬化させるレジン又は熱可塑性レジンで、個人トレー、ベースプレート等に用いる材料である。

【使用方法等】

1. ご使用になる前によく混合します。
2. 本品を3Dプリンターに投入します。
3. 3Dプリンターにて造形します。
4. 歯科技工用重合装置にて硬化させます。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ・本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- ・本品は、火気、高温、多湿を避けて暗所で保管すること。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
(記載の使用期限は当社データによる。)