

歯科材料(08) 歯科用石こう及び石こう製品
一般医療機器 歯科用樹脂系模型材 JMDN34811000

NextDent モデル 2.0

【禁忌・禁止】

メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状: 液体

本品は以下の構成からなる。

	製品名	製品番号
1	NextDent モデル 2.0	NextDent Model Peach
2	NextDent モデル 2.0	NextDent Model White
3	NextDent モデル 2.0	NextDent Model Grey

2) 成分: メタクリルオリゴマー、ホスフィンオキシド

3) 原理: 本品は、3D プリンターを用いて造形し、光重合により硬化します。

【使用目的又は効果】

本品は、歯科用模型及び修復物の作製過程で用いる各種高分子からなる材料である。

【使用方法等】

- ご使用になる前によく混合します。
- 本品を3Dプリンターに投入します。
- 3Dプリンターにて造形します。
- 歯科技工用重合装置にて硬化させます。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- 本品は、火気、高温、多湿を避けて暗所で保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
(記載の使用期限は当社データによる。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

*住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

*電話番号: 075-672-2118

外国製造業者: Vertex Dental B.V.

製造国: オランダ