

歯科材料(06) 歯科用印象材料
一般医療機器 歯科咬合採得用材料 JMDN70883000

NextDent トライイン

【禁忌・禁止】

メタクリル酸系モノマーに対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状：液体

本品は以下の構成からなる。

	製品名	製品番号
1	NextDent トライイン	NextDent Try-In TI0
2	NextDent トライイン	NextDent Try-In TI1
3	NextDent トライイン	NextDent Try-In TI2

2) 成分：エトキシ化ビスフェノールAジメタクリレート、他

3) 原理：本品は、3Dプリンターを用いて造形し、光重合により硬化します。

【使用目的又は効果】

本品は、クラウン、ブリッジ、義歯等を作製するために、上下歯列の咬み合わせや、上下顎の位置関係を記録する材料である。
ワックス材料を除く。

【使用方法等】

- ご使用になる前によく混合します。
- 本品を3Dプリンターに投入します。
- 3Dプリンターにて造形します。
- 歯科技工用重合装置にて硬化させます。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本品は【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- 本品は歯科医療有資格者以外が使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた患者には使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- 本品の使用により発疹、湿疹、発赤、腫脹、かゆみ、しびれ等の過敏症状が現れた術者は使用を中止し、医師の診断を受けること。
- 本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、すぐに大量の流水で洗浄し、医師の診察を受けること。

【保管方法及び有効期間】

〔保管方法〕

- 本品は、火気、高温、多湿を避けて暗所で保管すること。
- 本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

〔有効期間〕

本品は包装に記載の使用期限までに使用すること。
(記載の使用期限は当社データによる。)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

*住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

*電 話 番 号：075-672-2118

外国製造業者：Vertex Dental B.V.

製 造 国：オランダ