

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティワックス JMDN70896000

コルベンワックス

【形状、構造及び原理等】

形 状：φ2.0 mm（前歯列用）、φ2.2 mm（臼歯列用）

主成分：マイクロクリスタリンワックス、
パラフィンワックス

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックス。主に床辺縁の形成用に用いる。

【使用方法等】

本品を手指で屈曲させ、模型上にて床辺縁を形成する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③他の製品と混用しないこと。
- ④本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温にて保管すること。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社