

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## スパイラル・ホイール

### 【形状・構造及び原理等】

形状・寸法

直径 22 mm×厚さ 1.0 mm のディスク状

砥粒の粒度の違いにより、コース、ファイン、EX-ファインの  
3 種類がある。

種 類	用 途
コース	荒研磨
ファイン	仕上げ研磨
EX-ファイン	艶出し研磨

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\*住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

\*\*電 話 番 号：075-672-2118

\* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【使用目的又は効果】

ナイロンにアルミナ質硝材を含有し、ディスク状の形態をもつ研磨材。  
主に歯科用金属を研磨する。

### 【使用方法等】

中心孔に歯科用マンドレルを取り付け、歯科技工用ハンドピースに装着  
し研磨する。研磨部に応じて 2～3 枚を重ねて研磨出来ます。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入し  
て、半チャックでないことを確認すること。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は、10,000 回転を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ③本品を使用する際には目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用する  
こと。
- ④本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装  
置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ⑤本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ⑥本品は歯科材料の研磨以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

12 枚／函