

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研削器材 JMDN70908000

## ミニブラスター

### 【形状・構造及び原理等】

#### 1) 形状



2) 原理: 圧縮空気によりアルミナ製ビーズを噴出する。

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

\*住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*電話番号: 075-672-2118

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【使用目的又は効果】

保綴物等の研削に用いる。

### 【使用方法等】

- ①本体のボトルを取外し、表面処理剤(SAND)を入れてください。
- ②吸込みパイプをSANDにゆっくりと差し込んでください。
- ③ボトルを締めて取付けてください。
- ④ホースを本体に取付けてください。
- ⑤ホースに変換継手を取付けてください。
- ⑥本体側の継手とコンプレッサー側エア配管を接続してください。
- ⑦プラスチックボタンを押してSANDを吹き付けてください。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

### 【貯蔵・保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

1台/函