

機械器具 68 印象採得又は咬合採得用器具
 一般医療機器 歯科用咬合器 JMDN10201000

ラボメイトー II

【形状・構造及び原理等】

本体	アルミダイキャスト
インサイザルピン	ステンレス
マウンティングプレート	ナイロン (磁石埋込)
切歯路角プレート	ナイロン
顎路角プレート	
顎路軸	ステンレス

顎頭間距離	100 mm
矢状顎路傾斜角	20° ~40°
矢状切歯路傾斜角	10°
側方切歯路傾斜角	10°
上下顎間距離	70 mm
重量	360 g

【包装】

1 台/函 (スチール板 6 枚付き)

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号: 075-672-2118


* 製 造 元: デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用目的又は効果】

補綴物の製作及び診断に使用し、患者の咬合機能を技工室で再現する平均値咬合器。

【使用方法等】

- ・ 模型脱着
マウンティングプレートの磁石部にスチール板を載せ、歯科用石こうで模型を装着します。
- ・ 操作方法

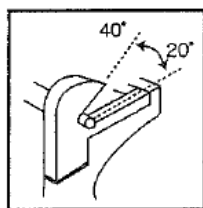

側方運動時、顎路角プレートの下辺を滑走させると 20° の傾斜角で運動し、上辺を滑走させると 40° の傾斜角で運動します。

【使用上の注意】

(使用注意)

- ・ 本品は、【使用目的又は効果】記載の用途以外には使用しないこと。
- ・ 本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

(保管方法)

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。