

機械器具 70 歯科用鑄造器  
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN70754000

## キャストリング

### 【形状・構造及び原理等】

①成分：ステンレス SUS304

②寸法：No.1 直径32mm×高さ40mm

No.2 直径43mm×高さ50mm

No.3 直径51mm×高さ55mm

No.4 直径61mm×高さ60mm

No.5 直径89mm×高さ61mm

### 【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用リング

### 【使用方法等】

歯科用キャストリングワックス等で作製した補綴物を円錐台に植立し、内面に緩衝材を巻いた歯科鑄造用キャストリングを円錐台にセットし各種埋没材を流し込み鑄型を作製する。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

①改造しないこと。

②鑄造の終了したリングは高温になっているので直接触れる場合は耐熱手袋等で手指を保護すること。

③本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

④本品は歯科鑄造用以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

No.1 3個入り

No.2 3個入り

No.3 2個入り

No.4 2個入り

No.5 1個入り

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\*住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\*電話番号：075-672-2118

\*製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社