

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN70754000

セラミック・リボン

【形状・構造及び原理等】

- * ①成分: アルカリアースシリケートウール
- * ②寸法: No.1 厚さ 1.0 mm×幅 32 mm×長さ 20 m
No.2 厚さ 1.0 mm×幅 42 mm×長さ 20 m
No.3 厚さ 1.0 mm×幅 48 mm×長さ 20 m

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる歯科用埋没材の膨張の緩衝材。

【使用方法等】

歯科用キャストリングワックス等で作製した補綴物を円錐台に植立し、内面に本品を巻いた歯科鑄造用キャストリングを円錐台にセットし各種埋没材を流し込み鑄型を作製する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- 本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- 本品は、歯科鑄造用以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔貯蔵・保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

- No.1 1巻入り
- No.2 1巻入り
- No.3 1巻入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住 所: 〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

**電 話 番 号: 075-672-2118

製 造 元: デンケン・ハイデンタル株式会社