

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用ユーティリティーワックス JMDN70896000

キャスティング：ワックス

【形状・構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、マイクロクリスタリンワックス
色素 等

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために補助的に用いる多目的ワックス。
主にインレー、及びクラウンのろう型作製時のスプルー及び
クラスプ、バー等のろう型作製に用いる。

【使用方法等】

歯科用インスツルメント等を用いて作業して下さい。
他、通法のとおり作業して下さい。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

包装：長さ 各 20 cm

番号	直径	1 函 (本入)
R25	2.5	50
R32	3.2	25
R50	5.0	10

番 号	幅径 (mm)	高さ (mm)	1 函 (本入)
HR19	1.9	1.0	100

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社