

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

サービカルワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：固形状・赤色

成分：パラフィンワックス、ダンマルゴム、
カルナバワックス、色素等

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製に用いる。
インレー、クラウン等のろう型及びマージン部の作製用。

【使用方法等】

歯科用インスツルメント等を用いて歯頸部に圧接して下さい。
他、通法のとおり作業して下さい。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温保管
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所など）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：60g/缶 色調：赤

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

**電話番号：075-672-2118

*製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社