

歯科材料07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科用キャストイングワックス JMDN16189000

カービングワックス

【形状・構造及び原理等】

成分：パラフィンワックス、ダンマルゴム、色素、
その他
形状：固形状。色調の違いにより以下の6種がある。
グレー、グリーン、ブルー、デンティン、
エナメル、オパール

【使用目的又は効果】

ロストワックス法による固定式補綴修復物のろう型作製又は試適、
実習用に用いる。
(グレー、グリーン、ブルー)
インレー、クラウン等のろう型作製用
(デンティン、エナメル、オパール)
歯冠用ワックス、試適用、実習用

【使用方法等】

歯科用インストゥルメント等を用いて作業して下さい。
他、通法のとおり作業して下さい。

【使用上の注意】

〔使用注意〕
・本品は、可燃性であるので、使用の際、火傷をしないよう注意すること。
・本品は、使用目的に記載した用途以外には使用しないこと。
・本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕
・室温保管
・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所など)に
放置しないこと。
・使用及び保管場所には、消化装置を備えること。
・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。
・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量：60g/缶
色調：グレー、グリーン、ブルー、デンティン、エナメル、オパール

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
** 住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
** 電話番号：075-672-2118
* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社