

**2020年12月改訂（第3版）

届出番号：26B2X10018M00031

*2017年4月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

歯科材料 07 歯科用ワックス
一般医療機器 歯科鑄造用シートワックス JMDN70894000

シートワックス

【形状・構造及び原理等】

形状：シート状（75×150 mm）
主成分：パラフィンワックス、合成ワックス
その他：色素
種類：厚さ 0.30 mm 0.35 mm 0.40 mm 0.50 mm 0.60 mm

【使用目的又は効果】

床、パー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製するために用いる。

【使用方法等】

必要量を切り取り、模型上に貼り付け使用します。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・本品は室温で保管すること。
- ・本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を設置すること。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管場所に大量に保管しない。
- ・本品は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

15 シート／ケース

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

外国製造所：メガデンタル（megadental GmbH）

国名：ドイツ