

歯科材料 07 歯科用ワックス  
一般医療機器 歯科用ベースプレート JMDN34808000

## メルトベースプレート

### 【形状・構造及び原理等】

形状：85 mm×105 mm×1.9 mm のシート状

主成分：パラフィンワックス、合成ワックス

その他：色素

### 【使用目的又は効果】

咬合堤の築盛又は試適用義歯作製の基礎となる土台をいう。

ワックス、セラック又は高分子からなり、個々の患者ごとに作製する。

### 【使用方法等】

- ①バーナー等で本品の両面加熱し、十分に軟化させます。
- ②軟化した本品を模型上に圧接します。
- ③不要な部分をデザインナイフ等でトリミングします。
- ④インストゥルメント等で辺縁を整えます。
- ⑤以下、通法に従いろう義歯を作製します。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は可燃性であるので、使用の際、火傷をしないように注意すること。
- ②本品は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ③本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・室温で保管すること。
- ・高温となる場所（ストーブの側、直射日光のあたる場所）に放置しないこと。
- ・使用及び保管場所には消火設備を設置すること。
- ・火気厳禁の場所に保管し、一つの保管場所に大量に保管しない。
- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

30 シート／ケース

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\* 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

\*\* 電 話 番 号：075-672-2118

\* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社