

器 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用高周波鑄造器 JMDN 70751000

キャスコム S

【警告】


- ①高温のリング等を扱うため、断熱手袋を装備して、やけどをしないように注意すること。
- ②溶融金属を直視すると、視力障害を起こします。溶融確認には遮光板を使用し、防護めがねを着用すること。

【禁忌・禁止】

ルツボ、リングなどの消耗品は弊社のもを使用すること。他社のもを使用すると、故障したり、ケガをする可能性があります。

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

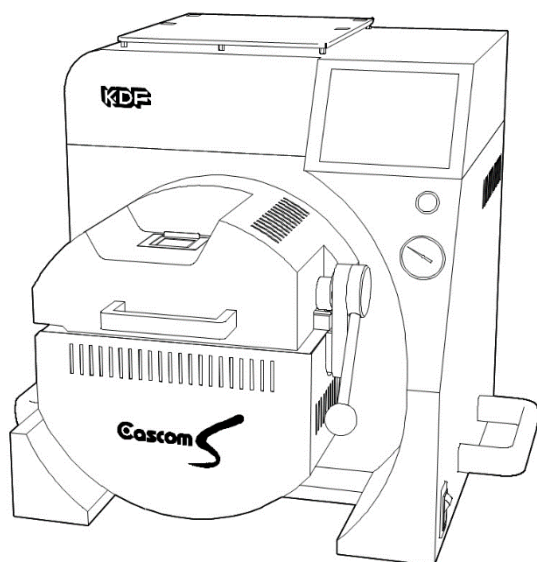

【使用目的又は効果】

高周波により歯科用合金を溶融・鑄造する装置。

【使用方法等】

- 1) 取り付け、設置
付属の取扱説明書を参照して、水平でしっかりした机に設置すること。
- 2) 操作方法または、使用方法
機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。
- 2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。
 - ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
 - ②接続されている圧縮空気の圧力は0.5MPa以上、1MPa以下であること。
 - ③アルゴンガスを使用する場合、その圧力は0.7MPa以上、0.8MPa以下であること。
 - ④周囲に燃えやすい物が無いこと。
- 3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
 - ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
 - ③外装温度が上昇するため、体が機器に触れないようにすること。
- 4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ①電源スイッチを切り、機器の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。
 - ②アルゴンボンベのバルブを閉めること。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書の「日常のお手入れ」の項をお読みください。

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者
デンケン・ハイデンタル株式会社
* TEL. 075-672-2118
- 2) 製造業者
デンケン・ハイデンタル株式会社