


器 68 印象採得又は咬合採得用器具
一般医療機器 歯科材料加温器 JMDN 70720000

KDF寒天コンディショナー

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

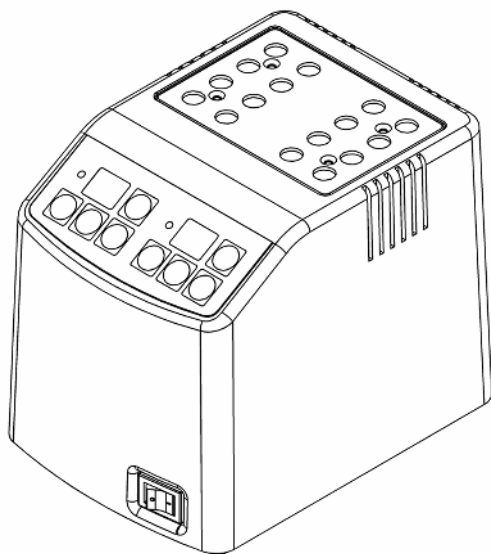

【使用目的又は効果】

寒天印象材カートリッジを適切な使用状態に維持するために用いる加温装置である。

【使用方法等】

本器の設置、使用方法については付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) 医療家以外は本器を使用しないこと。
- 2) 機器の使用中は次の事項に注意すること。
 - ①濡れた手でご使用にならないでください。感電の恐れがあります。
 - ②加熱中、保温中は、ヒーターカバー部および寒天カートリッジは高温になりますので十分ご注意ください。
 - ③機器に異常が見られる場合は、すぐにご使用を中止し、電源をお切りください。
 - ④機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。
- 3) 機器の使用後は次の事項に注意すること。
 - ①ご使用後しばらくは高温になりますので、火傷には注意してください。

【保守・点検に係る事項】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

- 1) ヒータ部の清掃は取扱説明書に従い行ってください。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用する際には、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

- 1) 製造販売業者
デンケン・ハイデンタル株式会社
TEL 075-571-1000
- 2) 製造業者
北菱電興株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください