

機械器具(69) 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN35761000

LC-3Dプリントボックス

【禁忌・禁止】

本品は歯科技工用重合装置です。他の用途には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

1) 形状：下記外観写真の通り



2) 構造・構成ユニット

寸法 (W, D, H)	410×440×380 (単位：mm)
質量	22kg
UVランプ	UV18W ランプ 71色 6個 UV18W ランプ 78色 6個
** 電源規格	100-240V, 50-60Hz
** 消費電力	Max. 264W

【使用目的又は効果】

本品は、歯科技工室で高分子材料を重合するために、加熱、加熱と加圧、光、またはこれらを組み合わせて重合を行う装置である。

【使用方法等】

操作方法

本器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

1. ガラスがはめ込まれた金属板をチャンバーに入れて、プリントされクリーニングされたオブジェクトをガラス上に配置する。
2. 装置の右側にある電源スイッチをONにする。
3. 前面パネルで操作時間を設定する。
4. 開始/停止ボタンを押す。操作時間がカウントダウンされドットが点滅します。
5. 操作時間後に終了のメッセージが表示されます。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1. 担当者以外は触らないこと。
2. アースが完全に接続されていることを確認すること。
3. 作動時はドアを閉めること。
4. 目的用途以外は使用しないこと。
5. 機器を分解、修理、改造しないこと。
6. 異常発生又は故障したときは、直ちに担当者又は当社指定の業者に連絡すること。

【保守・点検に係る事項】

- ・機器及び部品は、トレーニングを受けた者が必ず定期的な保守点検を行なうこと。
- ・しばらく使用しなかった機器を再使用する時には、使用前に必ず機器が正常かつ安全に動作することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

* TEL. 075-672-2118

外国製造業者：3D Systems Corporation

製造国：アメリカ合衆国

取扱説明書を必ずご参照ください