

フリー加熱式クリストバライト系埋没材

# プロベスト

急速加熱、ノーマル加熱を問わない  
フリー加熱式!

圧縮強さを大幅にアップ!



- 用途: インレー・クラウン・ブリッジ
- 対象金属: 金合金・銀合金・パラジウム合金
- 包装: 1.5kgシンプルパック×2

販売名 クリストバライト系埋没材 プロベスト  
 一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材  
 分類 一般医療機器  
 医療機器届出番号 21B3X00004000504

# プロベスト

## フリー加熱式クリストバライト系埋没材

KDFプロベストは微細な埋没材粒子を主成分とし、金合金・銀合金・パラジウム合金の casting クリストバライト系の埋没材です。特殊なバインダー成分を配合しているため、加熱方式は急速、ノーマルを問わず、幅広い御利用が可能です。

# KDF

### 1. フリー加熱

急速加熱はもちろん一般的加熱のいずれにも対応し、埋没後30分で焼却可能です。

### 2. 高い鑄造精度

膨張率は安定しており、より高い寸法精度を実現します。圧縮強さは大きく、いつも適合性のよい鑄造体が得られます。圧縮強さ5.9MPa (埋没30分後)


### 3. 滑沢な表面

微細な埋没材粒子を使用していますので、鑄造体は緻密で滑沢な表面性状を持ち、かつシャープなマージンが得られます。

### 4. 優れた操作性

練和物はクリーミーで適度な流動性があります。気泡の抜けがよく、細部への流し込みも簡単に行えます。

■加熱膨張特性

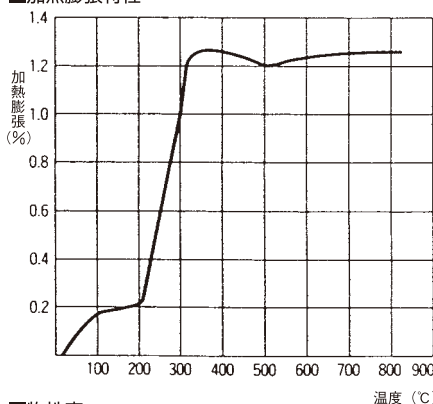

■物性表

混水量 (W/P)	32/100		
凝固時間 (分)	10±1		
加熱膨張 (%)	1.2~1.25% (700°C)		
凝固膨張 (%)	30分 0.55	60分 0.87	120分 0.95
圧縮強さ (MPa)	5.9	6.9	7.8

※試験方法：JIS T6601による

■ご注意

1. 塩化ビニル系やレジン系のスプルーを使用する場合には、急速加熱による焼却を行わないでください。
2. パターン先端からリング上面までの間は5~6mm以上確保してください。
3. 埋没後24時間を経過した場合は急速加熱による焼却を行わないでください。

●ネオ スーパーキャスコム ●エコ キャスコム

ヒータ加熱方式真空加圧鑄造機  
Vacuum and Pressure Casting with Muffle Heatup

クリーン・簡単・确实鑄造の未来派、  
さらにグレードアップ!!

- パーフェクト鑄造の追求!! ● 優れた鑄造性
- 幅広い金属、あらゆる症例の鑄造が可能
- 大幅に延びた寿命と溶融効率の優れたセラミックヒータ

#### 特長

- アルゴンガス雰囲気溶融・加圧システム (ネオスーパーキャスコムに装備)
- セラミックルーツボ使用回数カウンター (ネオスーパーキャスコムに装備)
- 多機能を簡単にコントロール Cascomシリーズは操作が簡単になりました
- これだけ充実した装備でありながらコンパクト Cascomシリーズは卓上サイズにこだわりました

販売名	ネオスーパーキャスコム	エコキャスコム
一般的名称	歯科技工用加熱炉鑄造器	歯科技工用加熱炉鑄造器
分類	一般医療機器	一般医療機器
医療機器届出番号	26B2X10018000002	26B2X10018000018

●製造販売業 許可番号 26B2X10018

## Neo Super Cascom

新開発ヒータで寿命3倍以上 (前機比)

eco Cascom  
KDF技術確信で2年保証



### ドリームシャイン

DREAM:SHINE



■メタルやアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂はもちろん、艶出しが難しいポリアミド系樹脂の艶出しにも楽に行えます。

用途：金属、熱可塑性歯肉床、レジン床の艶出し材

包装：1個 (145g)

歯科用研磨器材  
一般医療機器 (クラス I) 26B2X10018M00029

●製造販売業 許可番号 26B2X10018

### きんざん

KINZAN



■「1台2約!!」本体内部の仕切りパネルを動かすだけで、「石膏集塵エリア」と「貴金属回収」の切替がスムーズに行えます。特に貴金属は専用引出しタイプのため、回収が簡単です。

■伸縮ホースの採用により使いたい時に手元に移動できます。

■フロントにはガラス板を採用しスライド式で清掃が簡単。

用途：研削屑集塵ボックス  
サイズ：外寸W170mm×D220mm×H230mm  
(手挿入口径 120mm)  
ホース内径 φ38mm  
包装：1台 (ホース付)  
別売補充品：  
きんざんガラス板 1枚  
きんざん集塵ホース 1本  
きんざん (ゴールドボックス) 1個

※外観・仕様につきましては予告なしに変更する場合があります。

#### ●代理店

#### ●販売元

エアウォーターグループ



デンケン・ハイデンタル株式会社

http://www.kdf.co.jp/ Email denken@kdf.co.jp

#### ■お問合せは

西日本営業所  
TEL.075-571-1000  
FAX.075-572-9000

東日本営業所  
TEL.03-3969-8000  
FAX.03-3969-4567

九州営業所  
TEL.092-710-5360  
FAX.092-710-5361