

器 69 歯科用蒸和器及び重合器
一般医療機器 歯科技工用重合装置 JMDN 35761000

ツインキュア

【警告】

- ①本製品は歯科技工用重合装置です。他の用途には使用しないこと。
- ②機器の操作は習熟したもの以外は使用しないこと。
- ③使用者の安全を守り、機器を正しく使用するために注意事項を必ず守ること。
- ④故障したときは、適切な指示を行い、修理は専門家に任せること。
- ⑤高温の処理物等を扱うため、処理物の扱いは断熱手袋や専用の工具等を装備して、やけどをしないように注意すること。


【禁忌・禁止】

次の行為は危険ですのでやめてください。

- ①機器の改造
- ②不具合、故障状態での使用
- ③未整備状態での使用
(未整備状態とは、定期点検や日常の点検をしていない状態をいう)

【形状・構造及び原理等】

装置外観図

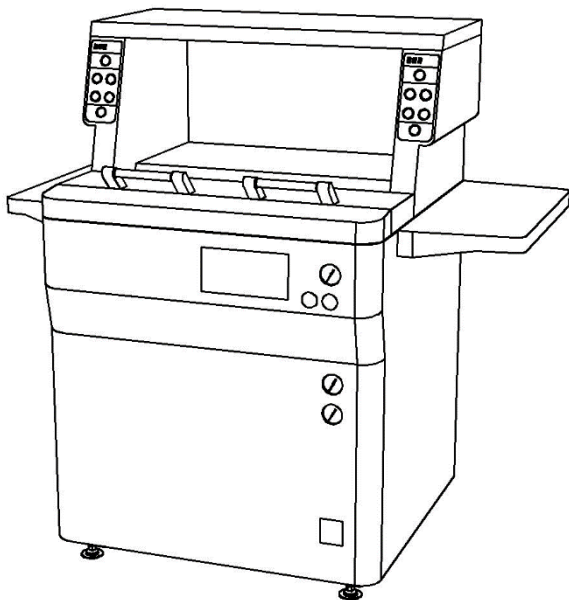

【使用目的又は効果】

本器は歯科技工室で、高分子材料を加熱によって重合する装置である。

【使用方法等】

1) 取り付け、設置

- ①機器の取り付け、設置は専門知識を持った担当者が行なうこと。
- ②機器の詳細な取り付け、設置は付属の取扱説明書を参照すること。
- ③機器は安定した、しっかりした床に設置すること。

2) 操作方法または、使用方法

機器の詳細な操作方法および、使用方法は付属の取扱説明書を必ずお読みください。

【使用上の注意】

詳細については取扱説明書を使用前に必ずお読みください。

1) 熟練したもの以外は機器を使用しないこと。

2) 機器を使用する前には次の事項に注意すること。

- ①アースが完全に接続されていることを確認すること。
- ②周囲に燃えやすい物が無いこと。

3) 機器の使用中は次の事項に注意すること。

- ①機器から異臭、異音が出るときは速やかに機器の電源を切り、弊社にご連絡ください。
- ②機器全般に異常が起きないか絶えず監視すること。
- ③外装温度が上昇する箇所があるため、体が機器に触れないようにすること。

4) 機器の使用後は次の事項に注意すること。

- ①機器の温度が下がってから、次回からの使用に支障のないように清拭すること。

【保守・点検に係る事項】

- 1) 機器及び部品は必ず定期点検を行うこと。
- 2) 長い間使用しなかった機器を再使用するときは、使用前に必ず装置が正常、かつ安全に作動することを確認すること。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

1) 製造販売業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

TEL. 075-672-2118

2) 製造業者

デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください。