

咬合堤軟化器が小型になって新登場

なん mini ちゃん

訪問診療に持ち込み易い小型ボディ

定評のあるハニカムによる軟化構造を継承

- **短時間**
約10秒で軟化が完了
- **均一**
任意の深さまで均一に軟化します
- **適温**
適温軟化は患者に
不快感・不安感を与えません
- **確実**
患者の噛み過ぎによる
失敗がありません
- **クリーン**
ワックスのたれを防止



販売名 なんちゃんミニ
一般的名称 歯科材料加温器
分類 一般医療機器
医療機器届出番号 26B2X10018000044

デンケン・ハイデンタル 株式会社
DENKEN-HIGHDENTAL Co., Ltd.

短時間・均一・適温・確実・クリーン軟化を小さくまとめました

なんちゃんミニは義歯を製作する過程で、ワックス咬合堤を軟化する装置です。
従来器「なんちゃん2」で確立した咬合堤軟化性能を継承し、ギュッと小型にしました。



なんちゃん mini

特徴

小型・軽量・スマートなデザイン



訪問診療を考慮し従来器と比べ小型軽量になりました。診察室にマッチする清潔感のあるデザインです。

簡単操作



電源スイッチを入れるだけの簡単操作です。
操作パネルもシンプルです。
温度設定はHigh/Lowの2段階です。

ワックスの清掃方法を改善



排口ローレーがシリコン製となり廃棄ワックスの取りのぞきが簡単にできます。

咬合堤軟化手順



ハニカム部に咬合堤を押し当て軟化させます。設定温度は任意に設定して下さい。




咬合堤の位置をずらし角度を変えたりして、2〜3回ハニカム部に押し当てます。



ベースプレートが当たる場合はハニカム部の端を使用して軟化させて下さい。



パーシャル症例の場合は、石膏模型からはずして軟化して下さい。

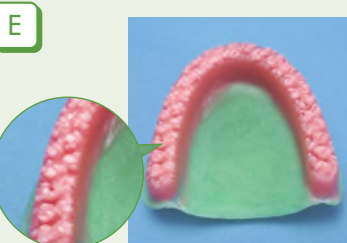

【軟化完了】
均一に軟化された状態です。



ドットホール部にロー堤を置き、前後に動かします。

咬合平面の作り方

仕様

名称	なんちゃんミニ
型式	DT-300
電源電圧	100V±10% 50/60Hz 2Pプラグ仕様(国内仕様のみ)
消費電力	Max. 200VA
外形寸法	(W)140×(H)95×(D)145mm
質量	0.7kg
スタンバイ時間	Highまで約5分

※外観・仕様については予告なしに変更する場合があります。

製造販売元 製造販売業 許可番号 26B2X10018



エア・ウォーターグループ

デンケン・ハイデンタル 株式会社

本社:京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

西日本支店

東日本営業所

九州営業所

☎075-672-2118

☎03-3969-8000

☎092-710-5360

代理店