


## ミニブラスター取り付け方法

### 各部の名称

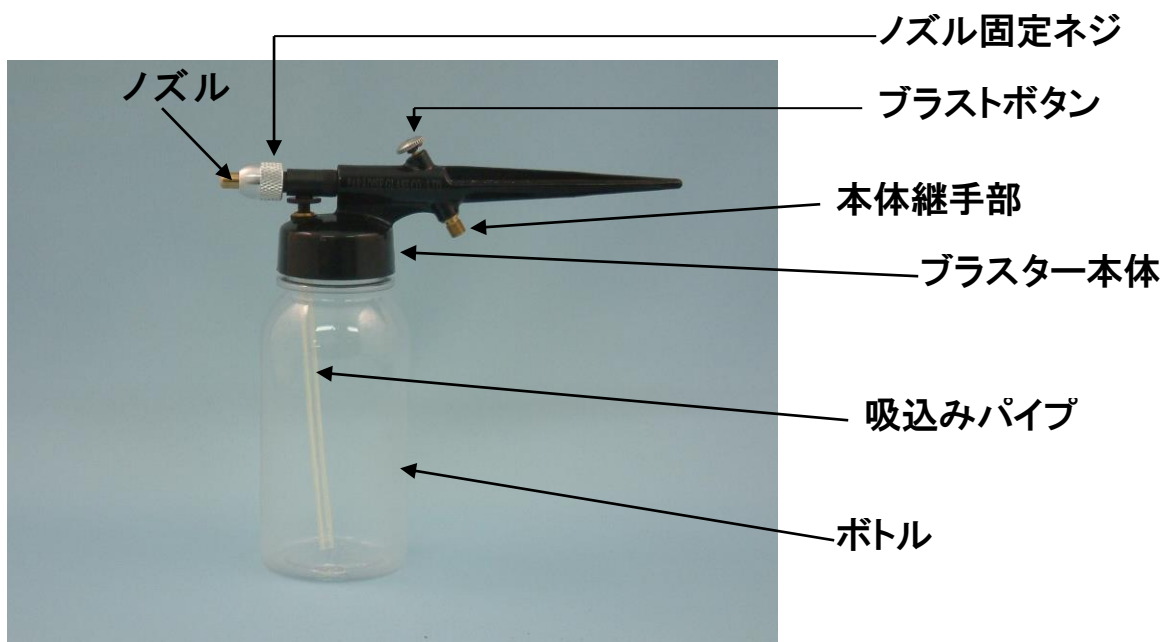

### (付属品)



変換プラグ



ワンタッチ継手(φ6×1/4)



ホースニップル(φ8×1/4)




ホース(細)



エアホース(φ6)

# ① ホース(細)を本体に取り付けて下さい。

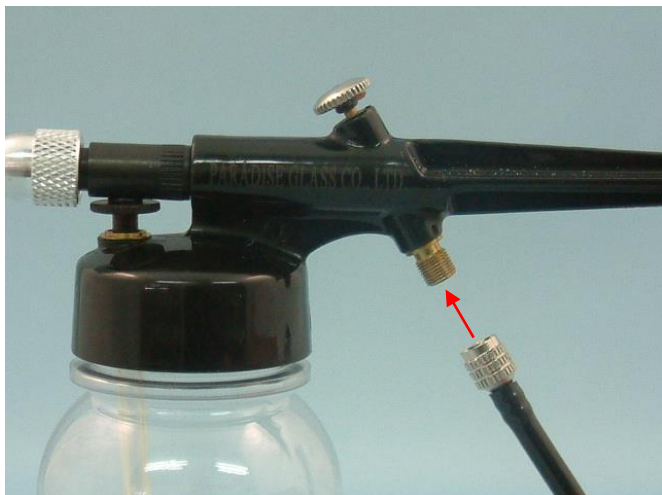

A




## ② ホース(細)に変換継手を取り付けて下さい。

※ 変換継手の口径は 1/4 です。

- ・ ユニットから直接ワンタッチで接続する場合  
(細いホースの長さは 150 c m です)

[A]の白い「変換プラグ」に各社の「ワンタッチプラグ 1/4 オス」を取り付けて下さい。

B

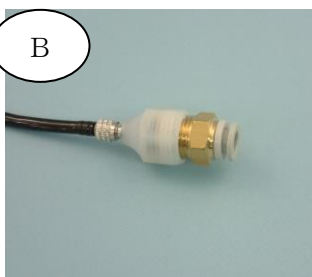

- ・ ユニットからワンタッチで接続 (150 c m 以上)  
細いホースは 150 c m のため、作業スペースまで届かない場合があります。  
その場合、付属品で[B]のように接続し、同じく付属品の 6 mm のホースをご使用ください。6mmホースとユニットの接続は各社の「ワンタッチプラグ 6mmホース用」をご使用ください

C



ユニットからワンタッチでエアールを取れない場合、[C] のようなパーツをご用意のうえ分配お願いいたします。(付属していません)

※ 必ず、0.1~0.28MPaに調圧されたエアールを接続してください。