

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科鑄造用コバルト・クロム合金 JMDN70788000

ハイコバルト-H ショット

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

形状：ショット状（0.4～10 g）

成分・分量：

成 分	分 量 (%)
コバルト	63.9
クロム	25.4
モリブデン	5.0
その他 (ニッケル、鉄、けい素、 アルミニウム、マンガン)	5.7

* 性能等：JIS T 6115:2013 歯科鑄造用コバルトクロム合金
タイプ 5、耐変色性

耐力 (0.2%) (MPa)	590
伸び (%)	4
ヤング率 (GPa)	245
密度 (g/cm ³)	8.3
硬さ (HV)	340
液相点 (°C)	1395
固相点 (°C)	1370

原理：本品を加熱溶解し、鑄型に鑄込んで所定の形状に成形する。

【使用目的又は効果】

主として鑄造クラスプ、バー及び金属床等の歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

【使用方法等】

取扱説明書をご参照ください。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ・埋没材の使用方法及びワックス焼却は、各々の添付文書等に従うこと
- ・本合金を再溶解する場合には、サンドブラスター等で埋没材、酸化膜を完全に取り除き、新しい合金を等量以上加えて溶解すること。
- ・歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ・本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・保護めがねを着用すること。
- ・他の合金と混用しないこと。
- ・本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ・本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ** ・本合金の溶解中に破裂する場合があります。
顔面保護面や手袋を着用するなど、注意して溶解すること。
- ・本合金の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

〔不具合・有害事象〕

有害事象

掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

本合金は、歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 kg/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

住 所：〒607-8187

京都府京都市山科区大宅石郡町 130

電 話 番 号：075-571-1000

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

取扱説明書を必ずご参照ください