

歯科材料 01 歯科用金属
管理医療機器 歯科鑄造用コバルト・クロム合金 JMDN70788000

キャストロイ-C

【禁忌・禁止】

本合金又は類似成分の合金に対して発疹、皮膚炎などの過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

- 1) 形状：インゴット状（4g～8g）
2) 成分・分量：

成分	分量 (%)
コバルト	64.9
クロム	28.0
モリブデン	5.7
その他 (ケイ素、マンガン)	1.4

*3) 性能等：

JIS T 6115:2013 歯科鑄造用コバルトクロム合金
タイプ 5、耐変色性

項目	仕様
耐力(0.2%) (MPa)	690～730
伸び (%)	3～4
ヤング率 (GPa)	230
密度 (g/cm ³)	8.3
硬さ (HV)	420
液相点 (°C)	1380
固相点 (°C)	1350

原理：本品を加熱溶解し、鑄型に鑄込んで所定の形状に成型する。

【使用目的又は効果】

主として鑄造クラスプ、バー及び金属床等の歯科修復物、補綴物又は装置の作製に用いる。

**【使用方法等】

リン酸塩系埋没材を使用し通法に従い、埋没鑄造してください。鑄造方法に関しては、各鑄造機の取扱説明書に従ってください。

電解研磨器、自動研磨器も使用できます。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 埋没材の使用方法及びワックス焼却は、各々の添付文書等に従うこと。
- 歯科用フラックスを使用する場合には、その説明書に表示してある使用上の注意事項を守ること。
- 推奨するろう材及びろう付方法
「コバルト・ソルダーⅡ」と「スーパーフラックス」でろう着、修理してください。

【使用上の注意】

(1) 使用注意

- ①本合金の鑄造設備付近には、局所排気装置、換気扇などを設けて、密閉した部屋での作業を避け、鑄造により発生する粉塵及び蒸気を吸入しないこと。
- ②本合金の研磨作業などの際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ③保護めがねを着用すること。
- ④他の合金と混用しないこと。
- ⑤本合金は、記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑥本合金は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

(2) 重要な基本的注意

本品の使用により発疹、皮膚炎などの過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。

(3) 不具合・有害事象

有害事象
掌蹠膿疱症、扁平苔癬、皮膚炎などの歯科貴金属疹(遅発性金属アレルギー疾患)を発症することがあります。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1 kg/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社