

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## ポリシャイン ダイヤ

### 【形状・構造及び原理等】

形状：固形状

成分：ダイヤモンド砥粒、植物油脂、その他

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

\*\*住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

\*\*電話番号：075-672-2118

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の仕上げ研磨に用いる。

歯科用金属、義歯床及び硬質レジン等の研磨用。

\*製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社

### 【使用方法等】

- 1.本品を技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けたバフホイール又はブラシ等に押しあて塗布する。
- 2.本品を塗布したバフホイール又はブラシ等を、補綴物の表面に軽く押しあてながら仕上げ研磨をする。

### 【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

質量：50 g/函