

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ポリ・バフ・ファイナル

【形状・構造及び原理等】

ホイール状。
サイズの違いによりレーズ用、ハンドピース用の2種がある。
レーズ用：直径 80 mm×厚さ 6 mm
ハンドピース用：直径 25 mm×厚さ 3 mm

【包装】

レーズ用：2個/袋
ハンドピース用：6個/函

【使用目的又は効果】

補綴物の仕上げ及び艶出し研磨に用いる。
歯科用金属、義歯床及び硬質レジン等の研磨用。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
** 住 所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3
** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用方法等】

レーズ用：本品を技工用レーズに装着し、回転させ、補綴物の表面に軽く押しあてて使用します。
ハンドピース用：マンドレルを取り付けた本品を技工用ハンドピースに装着し、回転させ、補綴物の表面に軽く押しあててます。

推奨回転数

形態	回転数
レーズ用	3,500 rpm
ハンドピース用	15,000 rpm

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。
- ②研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- ③使用回転数は低速を厳守すること。
- ④損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ⑤目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ⑥本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。