

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科技工用アブレイブ研削器具 JMDN70901000

ヒートレスホイール

【形状・構造及び原理等】

本品は形状の違いにより、8種がある。

ホイール状

直径約25mm×厚さ4.8mm

直径約25mm×厚さ3.1mm

直径約25mm×厚さ2.4mm

直径約22mm×厚さ3.1mm

直径約22mm×厚さ2.4mm

直径約19mm×厚さ4.8mm

直径約19mm×厚さ3.1mm

直径約19mm×厚さ2.4mm

【包装】

50枚/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

* 製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用目的又は効果】

炭化ケイ素を主成分とする研削材。

歯科用金属の研削に用いる。

【使用方法等】

本品を歯科用マンドレールに固定し、技工用ハンドピースに装着し、回転させ、被研削物に押しあてて使用します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1) ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3) 頭部の細い、長い、大きい形状のものは、折れたり曲がったりすることがあるので、無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ① 20,000 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ② 損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④ 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること