

歯科材料 09 歯科用研削材料
 一般医療機器 歯科技工用研削・研磨器材キット JMDN70906000

ポリアミド用艶出しKit

【形状・構造及び原理等】

構成品	一般の名称	形状
ポリシャイン コース	歯科用研磨器材	固形状
ポリシャイン ダイヤモンド	歯科用研磨器材	固形状
ポリシャイン ファイナル	歯科用研磨器材	固形状
ポリ・パフ ーナイロン	歯科用研磨器材	天然繊維からなる ホイール状の形態 をもつ研磨材
ポリ・パフ ーファイナル	歯科用研磨器材	ポリエステルから なるホイール状の 形態をもつ研磨材

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨、艶出しに用いる。
 主にポリアミド義歯の研磨用。

【使用方法等】

- ①ポリ・パフーナイロンにポリシャイン コース (レーズ用又は HP 用) を塗布し、補綴物に押し当て、研磨します。
- ②ポリ・パフーファイナルにポリシャイン ダイヤ (レーズ用又は HP 用) を塗布し、補綴物に押し当て、研磨します。
- ③ポリ・パフーファイナルにポリシャイン ファイナル (レーズ用又は HP 用) を塗布し、補綴物に押し当て、研磨します。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品の取り付けには、十分に留意し確実に取り付けること。
- ②研磨作業の際には粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が許可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸引しないこと。
- ③使用回転数は低速を厳守すること。
- ④損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ⑤目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- ⑥本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑦本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

構成品	数量
ポリシャイン コース	50 g
ポリシャイン ダイヤ	50 g
ポリシャイン ファイナル	50 g
ポリ・パフーナイロン	HP 用 2 個 レーズ用 1 個
ポリ・パフーファイナル	HP 用 2 個 レーズ用 1 個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所 : 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号 : 075-672-2118

* 製 造 元 : デンケン・ハイデンタル株式会社