

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

コバルトビッグポイント

【形状・構造等】

中心のシャフト先端に最大直径 10 mm、長さ 25 mm のポイント部を有する。

【包装】

12 本／函

【使用目的又は効果】

ゴム基材にアルミナ質研削材を含有するポイント状の形態をもつ研磨材。
コバルトクロム合金、ニッケルクロム合金等の硬質金属の研磨に用いる。

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

* 製 造 元：株式会社 ダイテックジャパン

種 類	用 途
コース	荒研磨用
ミディアム	中研磨用
ファイン	仕上げ研磨用

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピースに取り付け被研磨物に押し付け研磨します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1)ハンドピース（タービン）メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①5,000 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護めがねなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期限等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。