

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

スルホンビッグポイント

【形状・構造及び原理等】

中心のシャフト先端に最大直径 10 mm、長さ 25 mm のポイント部を有する。

【使用目的又は効果】

ゴム基材にアルミナ質研削材を含有するポイント状の形態をもつ研磨材。
ポリカーボネート床義歯及びレジン床義歯の傷取り研磨に用いる。

【使用方法等】

歯科技工用ハンドピースに取り付け被研磨物に押し付け研磨します。

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1)ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①5,000 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

25本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

**電話番号: 075-672-2118

製造元: 株式会社 ダイテックジャパン