

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

ラバーチスク

【形状・構造及び原理等】

形状: $\phi 23 \times t1.0$ mm

【製造販売者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

**電話番号: 075-672-2118

【使用目的又は効果】

クラウンブリッジの隣接面及びクラスプと床の隣接部の研磨用

*製造元: 株式会社 ダイテックジャパン

【使用方法等】

- ①デンケン・ハイデンタル「スルホンパットマンドレール」に確実に固定すること。
- ②歯科用電気エンジン、マイクロモーターなどに装着して使用する。
- ③必ず右回転使用すること。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1)ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①使用回転数 15,000 rpm 回転を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

24枚/函