

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

スルホンパット

【形状・構造及び原理等】

形状：ホイール状、直径25×厚さ7（mm）
砥粒の粒度の違いによりハード、ソフトの2種がある。
材質：ナイロン不織布、酸化アルミニウム砥粒

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社
** 住所：〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
** 電話番号：075-672-2118

* 製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社

【使用目的又は効果】

補綴物の研磨に用いる。
ハード：ポリカーボネート床義歯、ポリアミド床義歯
及びアクリル床義歯の荒研磨用。
ソフト：ポリカーボネート床義歯、ポリアミド床義歯
及びアクリル床義歯の仕上研磨用。

【使用方法等】

歯科技工用マンドレルに装着し、歯科技工用ハンドピースに取り付け被研磨物に押し当て研磨します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- 1)ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2)予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。
- 3)無理な角度、過度の加圧での使用は避けること。

【使用上の注意】

- 1)使用注意
 - ①6,000 rpm 回転数を超えて使用しないこと。
 - ②損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
 - ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
 - ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
 - ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

50枚/函