

**2020年12月改訂(第3版)

届出番号: 26B2X10018M00021

*2017年4月改訂(第2版)(新記載要領に基づく改訂)

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

布バフホイール

【形状・構造及び原理等】

形状: ホイール状 φ80×10 mm

【使用目的又は効果】

補綴物等の艶出し研磨に用いる。
歯科用金属、義歯床及び硬質レジン等の艶出し研磨用。

【使用方法等】

本品を歯科技工用電気レーズのチャック部に取り付け回転させて使用します。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①3,400 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

1ヶ／函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

**電話番号: 075-672-2118

*製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社