

** 2020年12月改訂（第3版）

届出番号：26B2X10018M00022

* 2016年6月改訂（第2版）（新記載要領に基づく改訂）

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ニュースルホンダイヤモンドブラシ

【形状・構造及び原理等】

形状：φ48 mm（1列）、φ70 mm（2列）、φ70 mm（3列）

構造：プラスチック製軸に化学繊維を植立させたブラシ。

【使用目的又は効果】

- ・補綴物等の研磨に用いる
- ・ポリカーボネート床義歯
- ・ポリアミド樹脂床義歯
- ・アクリル床義歯のレーズ研磨用

【使用方法等】

- ・本品を歯科技工用電気レーズのチャック部に取り付け回転させて使用します。
- ・レーズ研磨用みがき砂「ポリサンド」をご使用頂くとより効果を発揮します。

商品添付の取扱説明書をご参照下さい。

【使用上の注意】

1)使用注意

- ①3,400 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項及び説明書に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

3ヶ／パック

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号：075-672-2118

* 製造元：デンケン・ハイデンタル株式会社