

歯科材料 09 歯科用研削材料  
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

## ハイデンタルパット

### 【形状・構造及び原理等】

形状: ホイール状、φ25×t5mm  
砥粒の粒度の違いによりハード、ソフトの2種がある。  
材質: ナイロン不織布、酸化アルミニウム砥粒、  
その他

### 【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。  
ハード: ポリカーボネート床義歯、ポリアミド床義歯  
及びアクリル床義歯の荒研磨用。  
ソフト: ポリカーボネート床義歯、ポリアミド床義歯  
及びアクリル床義歯の仕上げ研磨用。

### 【使用方法等】

- 1) デンケン・ハイデンタル「スルホンパットマンドレール」に確実に固定すること。
- 2) 歯科用電気エンジン、マイクロモーターなどに装着して使用する。
- 3) 必ず右回転で使用する。
- 4) 予め予備運転させて、振れがないことを確認すること。

使用例: ポリカーボネート床義歯  
バリ取り タングステンバー「AX79F」又は「AX72F」  
↓  
粗研磨 ハイデンタルパット ハード  
↓  
細部研磨 ラバーポイント グレー  
↓  
中研磨 ハイデンタルパット ソフト  
↓  
砂研磨 スルホンダイヤモンドブラシ+スルホンポリサンド(P)  
↓  
バフ研磨 チャモイスホイール+ハイピッカー

【使用方法に関連する使用上の注意】

- 1) ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- 2) 無理な角度、過度の加圧での使用はお避けること。

### 【使用上の注意】

- 1) 使用注意
  - ① 8,000 rpm の回転数を超えて使用しないこと。
  - ② 損傷、変形等のあるものは、使用しないこと。
  - ③ 目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
  - ④ 本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
  - ⑤ 本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

### 【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕  
・ 歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

### 【包装】

12枚/函 60枚/函

### 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社  
\*\* 住所: 〒601-8356  
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3  
\*\* 電話番号: 075-672-2118

\* 製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社