

機械器具 49 医療用穿刺器、穿削器及び穿孔器
一般医療機器 歯科用マンドレル JMDN35170000

スルホン・パットマンドレル

【形状・構造及び原理等】

形状: 頭部φ8.0 mm、軸部φ2.3 mm、全長47.5 mm

材質: ステンレス鋼

【使用目的又は効果】

研削及び研磨用のジスク、ホイール等を保持するシャフト

【使用方法等】

本品の頭部にホイール、ジスク等を固定し、技工用ハンドピース等に本品の軸部を装着して使用します。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

- ①ハンドピース(タービン)メーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。
- ②予め予備回転させて、振れがないことを確認すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①指定(本品に取り付ける製品の被包又は説明書に記載)の回転数を超えて使用しないこと。
- ②損傷、変形(表面キズ、曲がり)等のあるものは、使用しないこと。
- ③目の損傷を防ぐために、保護メガネなどを使用すること。
- ④本材は、【使用目的又は効果】の項に記載の用途以外には使用しないこと。
- ⑤本材は、歯科医療有資格者以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量: 3本/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

**住所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

**電話番号: 075-672-2118

外国製造所: メガデンタル (megadental GmbH)

国名: ドイツ