

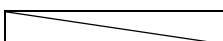
歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 JMDN70903000

コバルト：ホイール

【形状・構造及び原理等】

形状・寸法

直径 22.2 mm×厚さ 3.2 mm のホイール状

* 	用途
コース	荒研磨用

【使用目的又は効果】

ゴム基材に炭化ケイ素研削材を含有し、ホイール状の形態をもつ研磨材。
コバルトクロム合金及びニッケルクロム合金等の硬質金属の研磨材。

【使用方法等】

中心孔に歯科用マンドレルを取り付け、歯科技工用ハンドピースに装着し研磨する。

〔使用方法に関連する使用上の注意〕

ハンドピースメーカーの指定に従ってシャンクを確実に奥まで挿入して、半チャックでないことを確認すること。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品は、18,000回転を超えて使用しないこと。
- ・損傷、変形等のあるものは使用しないこと。
- ・本品を使用する際には目の損傷を防ぐため、保護メガネ等を使用すること。
- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスク等を使用すること。
- ・本品は歯科医療有資格者以外には使用しないこと。
- ・本品は歯科材料の研磨以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

100 枚入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電話番号：075-672-2118

外国製造所：イヴ（EVE Ernst Vetter GmbH）

国 名：ドイツ