

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

バイオルージュ

【形状・構造及び原理等】

形状: 固形状
成分: 酸化アルミニウム、その他

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。
歯科用金属、義歯床及びポリアミド樹脂、硬質レジン等の中仕上げ
研磨用。

【使用方法等】

- ①本品を技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けたブラシ、
またはバフホイール等に押しあて塗布する。
- ②本品を塗布したバフホイールを、補綴物の表面に軽く押しあてな
がらブラシ、または研磨をする。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所
吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を
吸入しないこと。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用し
ないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本品が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合に
は、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断を受けること。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

質量: 800 g/個

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

- *住所: 〒601-8356
京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3
- *電話番号: 075-672-2118

製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社