

歯科材料 09 歯科用研削材料
一般医療機器 歯科用研磨器材 JMDN70907000

ナノサンド

【形状・構造及び原理等】

形 状：粉末

成 分：非晶質シリカ、その他

【使用目的又は効果】

補綴物等の研磨に用いる。

ポリカーボネート床義歯、ポリアミド床義歯及びアクリル床義歯、ポリエステル床義歯のレーズ研磨用。

【使用方法等】

本品に水を加え泥状にしたものを補綴物に塗布し、技工用ハンドピース又は技工用レーズに取り付けたブラシ等で研磨する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ・本品を扱う際には、粉塵による人体への影響を避けるため、局所吸塵装置、公的機関が認可した防塵マスクなどを使用し、粉塵を吸入しないこと。
- ・本品を荒れ性の方が使用する場合、又は長時間使用する場合は、手袋等を着用すること。
- ・本品は【使用目的又は効果】の項に記載した用途以外には使用しないこと。
- ・本品は、歯科医療有資格者以外は使用しないこと。

〔重要な基本的注意〕

- ・本材が目に入らないように注意すること。万一目に入った場合には、直ちに大量の流水で洗浄した後、眼科医の診断をうけること。
(ガラス質なので、こすると眼球に傷をつける恐れがあります。)

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

- ・歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

* 質量：5 kg/函

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所：〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町 24 番地 3

** 電 話 番 号：075-672-2118

製 造 元：デンケン・ハイデンタル株式会社