

機械器具 70 歯科用鑄造器
一般医療機器 歯科技工用鑄造器関連器具 JMDN70754000

キャストリング用円錐台

【形状・構造及び原理等】

- ①成分: No.1~No.4 シリコン No.5 合成ゴム
②寸法: No.1 外径直径 40 mm 内径直径 31 mm
高さ 19 mm
No.2 外径直径 51 mm 内径直径 41 mm
高さ 22 mm
No.3 外径直径 59 mm 内径直径 50 mm
高さ 24 mm
No.4 外径直径 71 mm 内径直径 59 mm
高さ 27 mm
No.5 外径直径 105 mm 内径直径 87 mm
高さ 25 mm

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作製するために用いる鑄造用円錐台

【使用方法等】

歯科用キャストリングワックス等で作製した補綴物を本品に植立し、内面に緩衝材を巻いた歯科鑄造用キャストリングを本品にセットし各種埋没材を流し込み鑄型を作製する。

【使用上の注意】

〔使用注意〕

- ①本品は歯科医療有資格者以外は使用しないこと。
②本品は歯科鑄造用以外には使用しないこと。

【保管方法及び有効期間等】

〔保管方法〕

歯科の従事者以外が触れないように適切に保管・管理すること。

【包装】

- No.1 3個入り、No.2 3個入り、No.3 2個入り、
No.4 2個入り、No.5 1個入り

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元: デンケン・ハイデンタル株式会社

** 住 所: 〒601-8356

京都府京都市南区吉祥院石原京道町24番地3

** 電話番号: 075-672-2118

* 製造元: デンケン・ハイデンタル株式会社